

## Androstendion

- **Assay Format:** IMMULITE (LKAO), IMMULITE 2000 (L2KAO), IMMULITE 2500 (L5KAO)
- **Messbereich:** 0,3 - 10 ng/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,3 ng/ml (IMMULITE , IMMULITE 2000 , IMMULITE 2500)
- **Umrechnungsfaktor:** ng/ml x 3,4916 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	95%-Bereich (ng/ml)	97,5. Perc. (ng/ml)	Lit.
Gesunde Männer	IMMULITE	48	1,8	0,7 - 3,6	3,6	PILKAO-6
Gesunde Frauen		58	1,9	0,3 - 3,5	3,5	
Gesunde Männer	IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	48	1,6	0,6 - 3,1	3,1	PIL2KAO-8 PIL5KAO-4
Gesunde Frauen		58	1,7	0,3 - 3,3	3,3	
Probanden	System	n	Median (nmol/l)	95%-Bereich (nmol/l)	97,5. Perc. (nmol/l)	Lit.
männlich, 0 – 2 a	IMMULITE 2000	17	9,7	3,4 - 22,2	22,2	41
männlich, 2,1 – 4 a		14	< 1,0	< 1,0 – 10,3	10,3	
männlich, 4,1 – 6 a		22	< 1,0	< 1,0 – 5,8	5,8	
männlich, 6,1 - 8 a		18	1,3	< 1,0 – 6,5	6,5	
männlich, 8,1 – 10 a		25	2,0	< 1,0 – 4,5	4,5	
männlich, 10,1 – 12 a		23	3,0	< 1,0 – 7,8	7,8	
männlich, 12,1 – 14 a		40	5,3	< 1,0 – 9,5	9,5	
männlich, 14,1 – 16 a		48	6,2	1,6 – 12,2	12,2	
männlich, 16,1 – 18 a		29	9,4	3,4 – 14,6	14,6	
männlich, 18,1 – 20 a		23	8,2	4,6 – 14,9	14,9	
männlich, 21 – 30 a		78	8,0	4,7 – 15,0	15,0	
männlich, 31 – 40 a		67	7,2	4,5 – 13,1	13,1	
männlich, 41 – 50 a		99	7,0	4,1 – 11,2	11,2	
männlich, 51 – 60 a		76	6,5	3,9 – 9,3	9,3	
männlich, 61 – 70 a		73	5,9	2,7 – 9,3	9,3	
männlich, > 70 a		53	5,4	2,9 – 10,1	10,1	
männlich, Tanner 1	IMMULITE 2000	18	1,2	< 1,0 – 5,1	5,1	41
männlich, Tanner 2		15	3,1	< 1,0 – 7,7	7,7	
männlich, Tanner 3		34	4,4	< 1,0 – 9,4	9,4	
männlich, Tanner 4		26	6,1	4,2 – 10,0	10,0	
männlich, Tanner 5		18	10,4	7,2 – 13,1	13,1	
weiblich, 0 – 2 a	IMMULITE 2000	16	11,0	1,1 – 19,9	19,9	41
weiblich, 2,1 – 4 a		17	< 1,0	< 1,0 – 11,1	11,1	
weiblich, 4,1 – 6 a		21	< 1,0	< 1,0 – 11,3	11,3	
weiblich, 6,1 - 8 a		19	2,3	< 1,0 – 8,7	8,7	
weiblich, 8,1 – 10 a		35	2,5	< 1,0 – 5,3	5,3	
weiblich, 10,1 – 12 a		38	3,4	< 1,0 – 12,4	12,4	
weiblich, 12,1 – 14 a		43	6,7	1,7 – 11,6	11,6	
weiblich, 14,1 – 16 a		75	8,7	2,4 – 15,4	15,4	
weiblich, 16,1 – 18 a		54	10,3	1,4 – 17,3	17,3	
weiblich, 18,1 – 20 a		18	8,9	4,5 – 14,9	14,9	
weiblich, 21 – 30 a		58	5,2	2,6 – 9,8	9,8	
weiblich, 31 – 40 a		52	5,5	2,1 – 10,0	10,0	
weiblich, 41 – 50 a		54	4,4	< 1,0 – 10,3	10,3	
weiblich, 51 – 60 a		56	3,2	< 1,0 – 5,9	5,9	
weiblich, 61 – 70 a		59	2,4	< 1,0 – 8,1	8,1	
weiblich, > 70 a		38	4,0	< 1,0 – 8,0	8,0	
weiblich, Tanner 1	IMMULITE 2000	20	1,5	< 1,0 – 8,3	8,3	41
weiblich, Tanner 2		17	3,0	< 1,0 – 9,5	9,5	
weiblich, Tanner 3		39	5,2	1,8 – 16,8	16,8	
weiblich, Tanner 4		28	6,8	3,6 – 13,5	13,5	
weiblich, Tanner 5		56	8,9	3,5 – 17,3	17,3	