

## Digitoxin

- **Assay Format:** IMMULITE (LKDG) , IMMULITE 2000 (L2KDG), IMMULITE 2500
- **Messbereich:** bis 60 ng/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,65 ng/ml (IMMULITE), 1 ng/ml (IMMULITE 2500)
- **Umrechnungsfaktor:** ng/ml x 1,307 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	abs. Bereich (ng/ml)	Cut-off (ng/ml)	Lit.
Therapeutischer Bereich	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500			10 – 25		PILKDG-8 PIL2KDG-4 PIL5KDG-1 12
Toxische Wirkung					> 45	

Werte nicht auf IMMULITE bestimmt - Literaturwerte! (Keine Angabe zur Methode)

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	abs. Bereich (ng/ml)	Cut-off (ng/ml)	Lit.
Therapeutischer Bereich ≥ 6h nach Dosis	Keine Angabe			20 - 35		13
Toxische Wirkung ≥ 6h nach Dosis					> 45	

Probanden	System	n	Mittelwert (ng/ml)	Mittelwert ± 2s (ng/ml)	abs. Bereich (ng/ml)	Lit.
Therapeutischer Bereich Säuglinge, < 2a	Keine Angabe	18	30	10 - 50	14 - 58	52
Therapeutischer Bereich Kinder, 2-13a		23	34	12 - 56	19 - 61	
Toxische Wirkung Säuglinge, < 2a		4	71	67 - 75	68 - 72	
Toxische Wirkung Kinder, 2-13a		4	72	44 - 100	53 - 84	