

IGE , 3. Generation , Allergen-spezifisch

- **Assay Format:** IMMULITE 2000 (L2KUN), IMMULITE 2500 (L5KUN)
- **Messbereich:** bis 100 KU/l (WHO 2nd IRP 75/502)
- **Analyt. Sensitivität:** 0,1 KU/l (IMMULITE 2000 , IMMULITE 2500)

Reaktivität	System	n	Klasse	KU/l		Lit.
Fehlend oder nicht nachweisbar*	IMMULITE 2000 IMMULITE 2500		0**	< 0,10		PIL2KUN-9 PIL5KUN-5
Sehr niedrig				0,11 – 0,34		
Niedrig			I	0,35 – 0,69		
Moderat			II	0,70 – 3,49		
Hoch			III	3,50 – 17,49		
Sehr hoch			IV	17,5 – 52,49		
Sehr hoch			V	52,5 – 99,99		
Sehr hoch			VI	≥ 100		

* Nicht nachweisbar mit IMMULITE 2500 3g Allergy

** Klasse 0 im Standardsystem bedeutet nicht nachweisbar mit Assays der zweiten Generation