

LBP

- **Assay Format:** IMMULITE (LKL B)
- **Messbereich:** bis 200 µg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,2 µg/ml (IMMULITE)
- **Umrechnungsfaktor:** µg/ml × 1,000 → ng/ml

Probanden	System	n	Mittelwert (µg/ml)	abs. Bereich (µg/ml)	95. Perc. (µg/ml)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE	160	5,3	2 – 15,2	8,4	PILKLB-9
Probanden	System	n	Median (µg/ml)	95% - Bereich (µg/ml)	97,5. Perc. (µg/ml)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE	23	5,1	0,7 – 9,5		33
Probanden	System	n	Median (µg/ml)	abs. Bereich (µg/ml)	97,5. Perc. (µg/ml)	Lit.
SIRS	IMMULITE	40	30,6	9,2 – 79,5		33
Sepsis		19	37,1	11,8 – 76,2		
Septischer Schock		9	59,7	31,1 – 105		
Probanden	System	n	Median (µg/ml)	95% - Bereich (µg/ml)	abs. Bereich (µg/ml)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE		5,5	1,7 – 9,3	2,3 – 10,0	34
Infektion, Gram negativ		13	40,8		20,3 - 132	
Infektion, Gram positiv		17	35,6		7,3 – 108,5	
Pilzinfektion		5	39,9		18,1 – 82,7	
Probanden	System	n	Median (µg/ml)	95% - Bereich (µg/ml)	abs. Bereich (µg/ml)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE	34	6,2	5,3 – 7,1	3,2 – 12,3	35