

T4, frei

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKF4)
- **Messbereich:** 0,1 – 10 ng/dl
- **Analyt. Sensitivität:** 0,01 ng/dl
- **Umrechnungsfaktor:** ng/dl x 12,87 → pmol/l

Probanden	System	n	Median (ng/dl)	95%-Bereich. (ng/dl)	abs. Bereich (ng/dl)	Lit.
Euthyreose	Gamma-Counter	25	1,3	0,8 – 2,0		PITKF4
Schwangerschaft 1. Tri.		25	1,5	0,9 – 2,2		
Schwangerschaft 3. Tri.		49	1,5	0,7 – 2,1		
NTI		14	1,2		0,8 – 1,9	
Hypothyreose		49	0,20	n.n. – 1,03		
Hyperthyreose		52	3,8	1,2 – 11,4		